


FM-001-TM 通气面罩

使用说明书

RESCOMF®

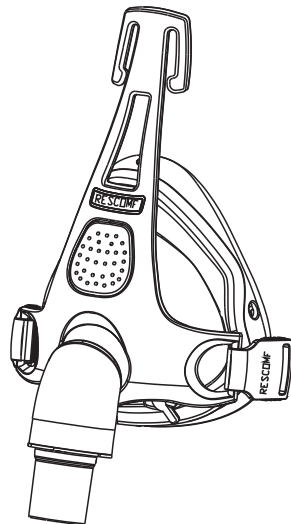


执行标准：
注册证号：
生产许可证号：粤食药监械生产许20142615号
专利号：ZL2014 3 0050590.X
制造商：东莞市毅达电子有限公司
地址：东莞市茶山镇塘角水围工业区马鞍山路
电话：400-822-0138

版本号：V1.0

结构组成

用户在使用前请详细阅读本说明书，以保证安全操作。
该产品由食品级聚碳酸酯、硅橡胶制成。

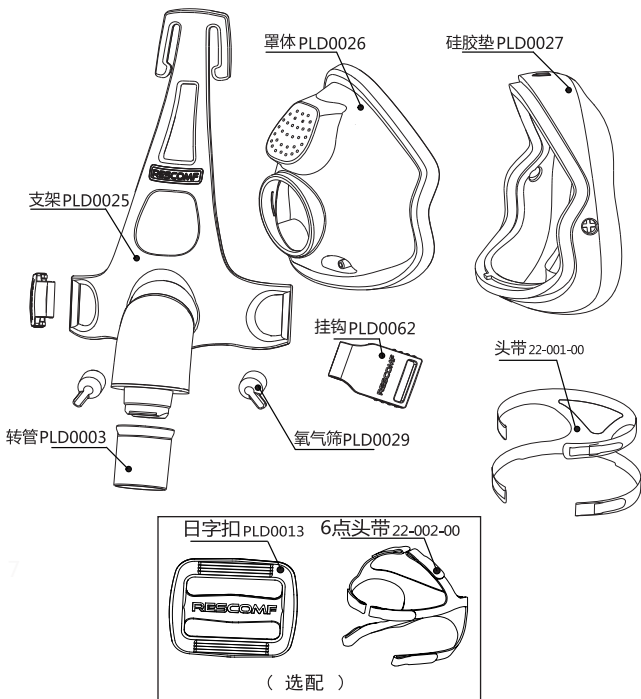


产品性能

通气面罩适用于经医生诊断需要持续正压呼吸治疗（CPAP）或双水平气道正压（BI-Level）通气治疗的患者使用。
此面罩适用于单个成年病人在医院、诊所或家庭中使用。

1. 本面罩的工作压力范围是4-25cmH₂O，温度范围是5-40°C。


氧气/压力口连接头

如果需要进行压力测量或连接氧气，请连接气管到罩体上氧气孔。

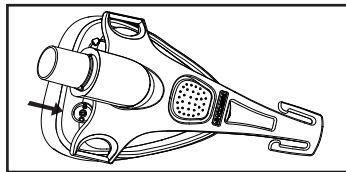

技术规格

排气流量

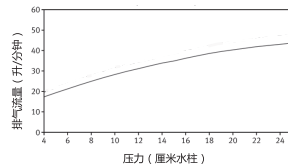


通气面罩死腔容积根据软垫尺寸大小变化，FM-001-TM
死腔容积：280ml(M)

外观尺寸：199.05X112.23X108mm


备注：制造商保留修改这些规格的权利，恕不另行通知。

通气面罩安装说明

- 1、安装前，请检查各部件是否出现任何可见劣化，如果某个部件出现了裂纹、龟裂、撕破等，应废弃并更换该部件。
- 2、将罩体推入支架（注意罩体的定位点方向对应支架的顶端），直到听到，<咔>一声响，安装到位，如图1。
- 3、将硅胶垫装在罩体上，先按定位点由顶部定位，然后依次整圈定位，压牢在罩体上，如图2。
- 4、通气面罩使用半年后建议更换，如有需求请联系您的专业医护人员或经销商及时更换。

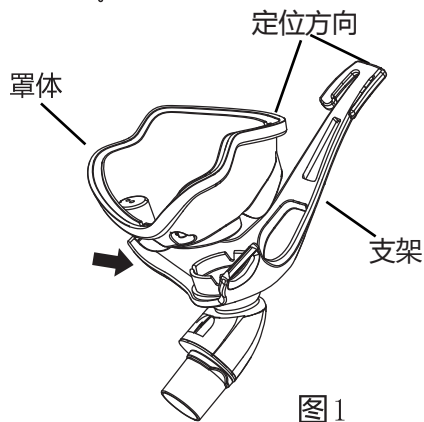


3

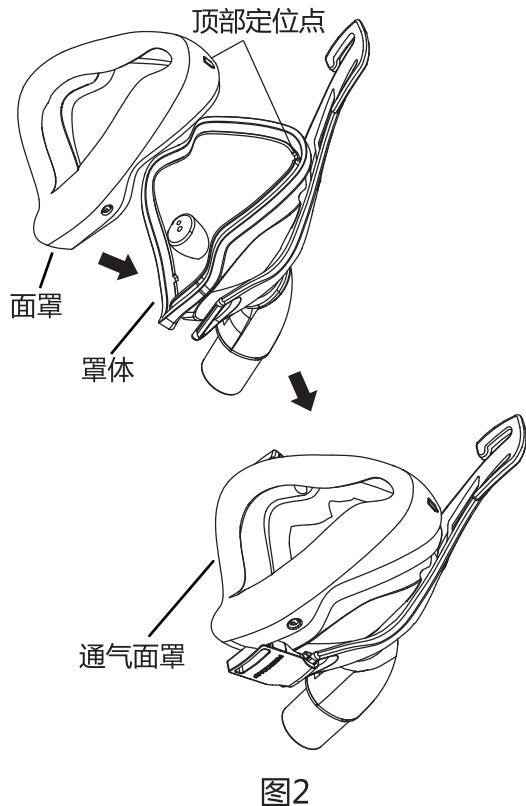


4


佩戴说明

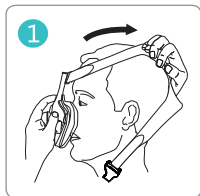


把通气面罩放在口鼻部，
将头带拉向头部。

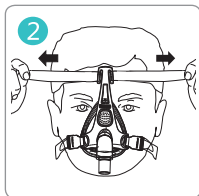


将挂钩挂好后，调整上部
头带，直至感觉舒适为止。

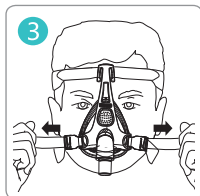

重复第2步，调整下部头带，
直至感觉舒适为止。

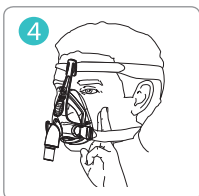

头带佩戴后，能够容纳
俩指为合适，不要过紧，
确保佩戴舒适。

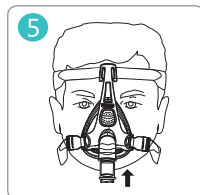

上下头带调整后，再将呼
吸管路与面罩连接。



打开呼吸机，开始治疗。

提示：在佩戴通气面罩前，请先固定头带两点至支架前端两个槽孔内。

清洗说明

A. 通气面罩清洁

- 1、每次清洗面罩，可直接用手拿着通气面罩组件在饮用水质量清水中充分清洗，清洗完后放在无直接阳光照射处晾干。
- 2、如需使用微温肥皂水清洗通气面罩，清洗后请用清水彻底洗净，确保无肥皂残留。
- 3、请勿使用含漂白剂，酒精，防腐剂，软水剂，保湿剂的清洁液清洗通气面罩的任意部件，这些溶剂可能损伤产品，缩短产品使用寿命。

B. 头带清洁

建议使用头带后每周清洗一次，用微温肥皂水清洗。清洗时用手轻轻揉搓头带，完成后再用清水彻底洗净，确保无肥皂残留后放在无直接阳光照射处晾干。

注意请勿将头带放入烘干机中烘干或对头带进行熨烫，可能会造成头带损坏。

本头带为易耗品，反复清洗后，粘贴牢固会有所下降。如果不能很好固定使用，请联系您当地的专业医护人员或经销商及时更换。

保修说明

通气面罩自终端用户购买之日起 90天内,按照使用说明使用,如出现因产品自身质量问题所产生的损坏,本公司视情况负责维修或更换。

弃置

本产品不含任何危害物质,可当做一般垃圾丢弃。

储藏环境

通气面罩应放在环境温度 -20°C ~ +55°C,相对湿度不大于93%、无腐蚀性气体、通风良好的避光处。

注意事项

- 1、检查患者的面部与通气面罩大小是否合适。
- 2、使用前,请阅读使用说明书并充分理解使用方法。
- 3、安装或佩戴前,请检查所有的部件,如有破损,开裂等请及时更换。
- 4、使用前应检查呼吸机的输出端及管路是否与本通气面罩配套(通气面罩接头为ISO 5356-1规定的22mm圆锥形接头)。

警告

- 1、本通气面罩是为专业医护人员所建议使用的CPAP或BPAP而设计的,本通气面罩不可作为维持生命系统用。
- 2、在使用中切勿堵塞或尝试封住面罩的排气孔。
- 3、如与CPAP或BPAP呼吸机同时使用氧气,当氧气发生器不工作时必须将氧气通道关闭,否则呼吸机内积聚氧气容易引起火灾。
- 4、在使用氧气时应禁止使用明火。
- 5、以固定流率补充氧气流时,吸入氧气的浓度会根据压力设置、患者呼吸模式、鼻罩的选择和漏气率的不同而变化。此警告适用于大多数型号的CPAP和BPAP。
- 6、如果CPAP或BPAP的压力较低,呼出的部分气体可能会被再次吸入,而对人体造成伤害。
- 7、中风病人的使用:研究证明,中风病人对正压呼吸治疗机(CPAP)的治疗顺应性很低。因此,对中风病人进行正压呼吸治疗机(CPAP)治疗时,应该对其接受能力进行仔细的评估。
- 8、如果使用时感觉不适或出现刺激症状,请中断使用面罩,并与专业医护人员或经销商联系。
- 9、使用此通气面罩时可能会造成牙齿、牙龈或上颌疼痛,或者导致当前的牙齿问题恶化。如果出现以上症状,请咨询您的专业医护人员。
- 10、本面罩只适用于本手册所描述的用途,如有疑问请联系专业护理人员或经销商。